

# Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite 3-SONE Overmadrass

## Bruksområde

Stimulite 3-SONE overmadrasser er produsert for å forebygge og behandle trykksår

## Bruksanvisning

Din Stimulite 3-SONE overmadrass Ta av emballasjen, velg ønsket overtrekk og rull deretter overmadrassen oppå undermadrassen. Cellene i madrassen skal ha den åpne siden opp.

Overmadrassen og trekkene har festeanordninger for å feste overmadrassen i undermadrassen. Disse finnes for at madrassen skal ligge stille, samt gi en mulighet til å evakuere en person som ligger i en nødsituasjon. Fest båndene på madrasskjernen i sengegavlen, alternativt hygienetrekets elastiske bånd i undermadrassen. Juster ved behov.

## Anvendelsesanvisning

Stimulite 3-SONE overmadrass er beregnet til bruk i kombinasjon med en annen madrass. Vektklasse brukere 25-180 kg.

For beste behandlingseffekt. Bruk kun et løst spent laken over madrasskjernen. For å beskytte undermadrassen (mot kroppsvæsler osv.) kan man bruke vår fukttoppsamler (INMATT3227) som da plasseres under madrassen.

Har man inkontinens, finnes et overtrekk (hygienetrekk) som puster, men som likevel tåler fuktighet (COVIN3380, 3480 og 3680. Ulike størrelser for ulike overmadrasskjerner.)

Hvis man har behov for ytterligere komfort, for eksempel øm hud, finnes et komforttrekk i myk bomull, (COVST4080. En størrelse passer til alle madrasskjerner.) Det slipper gjennom luft og gir ekstra komfort til ømme kroppsdeler.

## Vaskeanvisninger

3-SONE overmadrass: løsne borrelåsene og ta madrassen ut av overtrekket. Hvis madrasskjernen er støvete, går det fint å støvsuge eller blåse den ren med trykkluft. Når man senere vasker i maskin, vend eller rull madrassen, slik at de åpne cellene

kommer ut mot trommelen. Hvis du har en vaskepose, beskytter det madrasskjernen, men det går også bra å vaske uten vaskepose. Bruk vaskemiddel uten blekemiddel og vask madrassen alene i vaskemaskinen. Hvis madrassen er lett tilsmusset, vask på 40°. Ved sterkere tilsmussing tåler madrassen 85 grader i 10 minutter alt. 60 grader i 30 minutter. Madrassen kan også vaskes i badekaret, dusjes eller vaskes med slange. La madrasskjernen lufttørke. Hvis du behøver å tørke madrasskjernen hurtig, bruk håndduker, hårtørker, element eller tørketrommel, ca. 30 minutter (maks varme 60°).

Madrasskjernen tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på madrasskjernen, alternativt legg hele madrasskjernen i et kar i 10 minutter med fortynt løsningsmiddel. Skyll etter med vann. Hygienetrekke (COVIN) kan vaskes i vanlig maskin 95 grader og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel. Hygienetrekke kan også tørkes av med overflatedesinfeksjon, for eksempel alkohol. Fuktoppsamleren (INMATT3227) kan vaskes i vanlig maskin 95 grader og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel.

## Rekondisjonering / Klargjøring for lager

Trekk og madrass er utstyrt med artikkelnummer. Vask i henhold til instruksjonene ovenfor. Overflatedesinfeksjon (type virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg madrassen i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

## Flammesikkerhet

Trekket og madrasskjernen er branntestet i henhold til EN 597-1 og EN 597-2. Kjernen i overmadrassen og madrassen er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige Stimulite-produkter er dessuten branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16..

# Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite 3-SONE Overmadrass

## Garanti

Alle StimulITE madrasssekjerner er CE-merket og har 2 (to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil.

Garantien dekker ikke unormal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

## Tekniske data

3-SONE overmadrass består av 100 % termoplastisk polyuretan TPU i bikubestruktur. Naturlig antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnet til bruk for allergikere

Vekt:	7 kg
Høyde:	7 cm
Bredde:	82,5, 85 eller 90 cm
Lengde:	200 cm

Artikkel	Artikkelnr	Størrelse	Består av
3-SONE Overmadrass pakke	3ZON82	82,5 x 200 x 7 cm	GSR00056 + COVIN3380 + BAG
	3ZON85	85 x 200 x 7 cm	GSR00067 + COVIN3480 + BAG
	3ZON90	90 x 200 x 7 cm	SRC00024 + COVIN3680 + BAG
3-SONE overmadrass	GSR00056	82,5 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	GSR00067	85 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	SRC00024	90x200x7	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
Hygienetrekk	COVIN3380	Passer til GSR00056, 3ZON82	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3480	Passer til GSR00067, 3ZON85	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3680	Passer til SRC00024, 3ZON90	58 % polyuretan, 42 % polyester
Fuktoppsamler (sengebeskyttelse)	INMATT3227)	(passer til alle Stimulite madrasssekjerner 80 x 200 cm)	68 % polyester, 30 % bomull, 2 % polyolefin
Mykt bomullsovertrekk	COVST4080	(passer til alle Stimulite madrasssekjerner)	91 % bomull, 9 % elastan
Veske til å bære madrassen	BAG	passer til alle Stimulite madrasssekjerner)	52 % akryl, 42 % bomull og 6 % polyester
Vaskepose for madrasssekjerne	LDBAGBED	passer til alle Stimulite madrasssekjerner)	

Hvis du opplever ubehag ved bruk av madrassen, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

*Lykke til med ditt StimulITE-produkt!*

*Göran & Brigitte Sjødén*

Göran Sjødén's Rehabshop Norge A/S  
Postboks 157 1378 Nesbru  
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru  
Tlf. 48 50 32 97  
[www.rehabshop.com](http://www.rehabshop.com), [goran@rehabshop.com](mailto:goran@rehabshop.com)

2(2) 2016-05-20

