

BRUKERINFORMASJON / BRUKSANVISNING STIMULITE® SITTEPUTER



Innledning

StimuLITE® sitteputer er beregnet for bruk i rullestoler og produsert for å forhindre trykksår. Modeller med 2 lag StimuLITE-materiale, Slimline™, Sport, Smart og Silver, er primært beregnet for å forebygge trykksår. Modeller med 3 lag StimuLITE-materiale, Contoured, Classic og Classic Barriatric er beregnet for høyrisikobrukere. Alle StimuLITE-produkter er ventilierende og fuktavledende for å holde deg tørre og kjølig.



Bruk av sitteputen

Puten er laget for bruk i hverdagen. Det er lett å bruke utenfor rullestolen, som i bilen eller i dusjen hvis behovet oppstår. Den tolererer også normale temperaturer fra -30 ° til +60 ° C. Før du bruker StimuLITE-produktet, må pakken fjernes. Trekket er festet til produktet når det leveres. Produktet fungerer best med trekket tiltrukket, men det er ikke farlig å sitte på det uten.

Første bruk / testing.

Pass på at du har riktig størrelse for å passe rullestolen godt. Legg puten i stolen den skal brukes i. Legg puten med trekket på med den glatte stoffsiden opp og den avrundede siden med den hvite etiketten tilbake med ryggstøtten.



Borrelåset på trekket bør om mulig passe med borrelåsen på rullestolsetet. Glidelåsen på trekket skal være lukket og tilbake til ryggstøtten.

Produktet ditt leveres med et fuktoppsamlere. Det skal plasseres med den hvite siden opp inne i trekket og under puten.



Når puten er i stolen, bør du sette deg selv. Puten er veldig stabil og gir mulighet for forflytning i flere trinn. Husk at bukser med store baklommer og store dekorasjoner kan forårsake ubehag. Putens ventilierende og drenerende egenskaper holder deg tørt og kjølig. Vær oppmerksom på dette når du velger bukser for å få maksimal effekt av puten. Når du sitter over hele seteputen, bør du ikke føle ubehag.

Trygt sittende

Kontroller regelmessig at du er komfortabel på puten din. Det er lett for deg å lene deg fremover og føle deg under dine sitte ben med fingrene. Hvis du føler bunnen, bør dette nøye undersøkes av en terapeut. Hvis du opplever ulempe med sitteputen eller hudrødhet, som vedvarer etter 5 minutter, avbryter bruken og kontakt legen eller terapeuten din.

Produktinnhold

StimuLITE er laget av 100% TPU. Trekket består av Cordura® og polyester.

Vasking / rengjøring

StimuLITE sitteputer kan vaskes enten for hånd eller i maskin. Bruk små mengder vaskemidler uten blekemiddel.



Maks 30 min

Maks 50°C

Vask puten og trekket separat i den medfølgende vaskeposen. Jo oftere du vasker puten, jo bedre er formen og egenskapene til puten.

Kontroll av puten

Det anbefales at du regelmessig sjekker sitteputen din. Fjern deretter trekket og trykk på cellene med fingrene. Cellene skal være elastisk og smidige. Hvis de ikke er, er puten brukt opp og du bør da kontakte din terapeut for en ny test.

Branssikkerhet

Alle StimuLITE sitteputer er branntestet og CE-merket.

Garanti

2 års garanti gjelder StimuLITE sitteputer. Garantien inkluderer skader på grunn av produksjons- eller materialfeil. Garantien dekker ikke unormal håndtering eller slitasje.

Når produktet er oppbrukt

For å kaste bort puten din, sett den inn i plastgjenvinning.



Lykke til med din StimuLITE sittepute!



GÖRAN SJÖDEN'S REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +47 48 50 32 97

e-post: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as