


FORSKRIVERINFORMASJON STIMULITE® SITTEPUTER



Innledning

StimuLITE® sitteputer er beregnet for bruk i rullestoler og produsert for å forhindre trykksår. Modeller med 2 lag StimuLITE-materiale, Slimline™, Sport, Smart og Silver, er primært beregnet for å forebygge trykksår. Modeller med 3 lag StimuLITE-materiale, Contoured, Classic og Classic Bariatric er beregnet for høyrisikobrukere. Alle StimuLITE-produkter er ventilierende og fuktavledende for å holde deg tørre og kjølig.

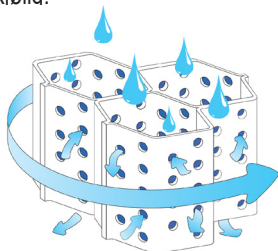

Utprøvningsanvisning

Legg puten i rullestolen med glatt side opp og den avrundede siden med den hvite etiketten tilbake med ryggstøtten. Borrelåsen på trekket skal være på undersiden og glidelåsen skal være lukket og på baksiden. Tillat personen å sitte på puten i minst 30 minutter da den justerer seg under en første test. Hvis du vil endre en eksponeringsvinkel, bruker du kilstøtten våre (KIL3 og KIL5) for eksempel. Puten krever ingen annen innstilling. Du kan kutte pute slik at den passer i stolen som beskrevet nedenfor.

Standard størrelser

36x36 cm	41x41 cm	46x41 cm
36x41 cm	41x43 cm	46x43 cm
36x46 cm	41x46 cm	46x46 cm
36x51 cm	41x51 cm	46x51 cm
38x41 cm	43x41 cm	51x41 cm
38x43 cm	43x43 cm	51x46 cm
38x46 cm	43x46 cm	51x51 cm
38x51 cm	43x51 cm	

Runde bunn for hengekøye sete (S)

- Standard bunn for flatt sete



Inkontinensbeskyttelsen som følger med, er plassert under puten inne i dekselet med den hvite siden opp.

Putens vekt

Vekt 41x41 cm, Slimline™, Sport ca 1 kg, Classic og Contoured 1,5 kg. Bariatric 3 kg.

Høyde:

Slimline™ (SM og SMXS)	6 cm
Sport (SP)	5 cm
Contoured (CD, CDBB, CDXS, CDBBXS)	8 cm
Classic (CL og CLXS)	6 cm
Silver (SI)	3 cm
SMART (SMRT)	5 cm
Pediatric Contoured (PDCD)	7 cm
Pediatric Corbee® (PD)	5 cm
Classic Bariatric (CLBA)	7 cm

Maks Brukervekt

Barnputer (PD, PDCD)	50 kg
Voksenputer	130 kg
Classic Bariatric	360 kg

Produktinnhold

StimuLITE er laget av 100% TPU. Trekket består av Cordura® Kevlar (brannteppe) og polyester.

Vasking / rengjøring

StimuLITE sitteputer kan vaskes enten for hånd eller i maskin. Bruk små mengder vaskemidler uten blekemiddel.



Maks 30 min



Maks 50°C

Vask puten og trekket separat i den medfølgende vaskeposen. Jo oftere du vasker puten, jo bedre er formen og egenskapene til puten. Etter vask, dra på trekket med glidelåsen bakover mot rundrekken og de åpne cellene oppover.

Rekondisjoning

Virkon-løsning kan brukes til å rense StimuLITE®-produkter fra MRSA-bakterien.

Kontroll av puten

Det anbefales at regelmessig sjekker sitteputen. Fjern deretter trekket og trykk på cellene med fingrene. Cellene skal være elastisk og smidige. Hvis de ikke er, er puten brukt opp.

Brannsikkerhet

Alle StimuLITE sitteputer er branntestet enligt ISO 7176-16 och SS-EN 1021 og CE-merket. Trekkets flammehemmende beskyttelse er et tynt strekk stoff i Kevlar, som er festet under toppen av trekket.

Garanti

2 års garanti gjelder StimuLITE sitteputer. Garantien inkluderer skader på grunn av produksjons- eller materialfeil. Garantien dekker ikke unormal håndtering eller slitasje.

Når produktet er oppbrukt

Når puten er forbrukt, sett den inn i plastgjenvinning.

Lykke til med din StimuLITE sittepute!



GÖRAN SJÖDEN'S REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +47 48 50 32 97

e-post: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as

Du kan endre Stimulite sitteputer som følger, og fortsatt beholde CE-merking:

Puten er laget av 100% termoplastisk polyuretan. Det er kuttet med en skarp kniv eller båndsgag. Men kan også med fordel bli kuttet med en kniv, hvor den varmer bladet. Puten er "reparert" ikke opp, men beholder sin form etter at den er kuttet

SETEBREDE: Man må beskjære puten lengderetningen opp til 2,5 cm på hver side. Dermed maks 5 cm totalt.

BAKKANTEN: Vi må kutte ut for rullstolsrør. Kut hjørnet av puten så stort som røret har en diameter

Du må ikke kutte hele bakkanten på sitteputen!

FORKANTEN: Vi må kutte puten i dybden, og vi må kutte forskjellig måte for hver bein. Gjør det gjennom en vertikal 90° kuttet til snittflaten. Maks 5 cm total dybde.

PUTE HØYDE: Det er ikke lov til å endre eller kutte opp på overflaten eller på under-siden av puten. Det er kun lov til å kutte kantene, se ovenfor.

